

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare întrucât conțin informații importante cu privire la modul corect de utilizare a produsului.

Dispozitivul medical **VIZIK Allergy** se eliberează fără prescripție medicală.

Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru a le putea reciti la nevoie.

Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați medicul sau farmacistul.

# Vizik

Dispozitiv medical

### Allergy

Fără conservanți

Picături de ochi cu hialuronat de sodiu 0.15% și ectoină 2%

#### DESCRIERE:

**VIZIK Allergy** conține ingrediente din surse naturale și dovedite clinic, eficiența lor fiind susținută științific.

Picăturile de ochi conțin hialuronat de sodiu, sarea de sodiu a acidului hialuronic care, datorită proprietăților fizice, formează un scut de protecție uniform, puternic și de durată pe stratul epitelial al ochiului, fără a afecta vederea. Ectoina este o moleculă naturală de protecție a celulelor cu proprietăți antiinflamatoare și de stabilizare a membranei, ce atrage și reține umiditatea și stabilizează stratul lipidic al filmului lacrimal.

Picăturile de ochi izotonice hidratează și lubrifiază ochii și formează un complex protector eficient împotriva influențelor nocive ale alergenilor. De asemenea, susțin procesul de regenerare a conjunctivei iritate și sensibile și ajută la ameliorarea simptomelor specifice alergiei, precum mâncărime, înroșirea ochilor și senzație de arsură.


Picăturile pentru ochi se pot utiliza și preventiv (de exemplu, înainte de apariția simptomelor alergiilor sezoniere).

#### Picăturile de ochi VIZIK Allergy:

- **Reduc inflamațiile conjunctivei produse de alergeni.**
- **Atenuază disconfortul ocular (ochi roșii, mâncărime și ochi înlăcrimați) provocat de polen, praf, părul de la animale.**
- **Protejează împotriva influențelor nocive ale alergenilor.**
- **Susțin procesul de regenerare a conjunctivei iritate și sensibile.**
- **Cresc vâscozitatea și au efect calmant.**
- **Potrivite pentru persoanele care poartă lentile de contact.**
- **Potrivite pentru persoanele cu ochi sensibili.**
- **Potrivite pentru copii.**

#### UTILIZARE:

Înainte de prima utilizare, desfaceți sigiliul prin tragerea inelului de siguranță până când acesta este îndepărtat complet (1). Apoi scoteți capacul trăgând în sus (2). Înclinați puțin capul pe spate, priviți în sus și trageți ușor în jos pleoapa inferioară a ochiului. Țineți flaconul cu picurătorul în jos și prin presare aplicați câte o picătură în sacul conjunctival al ochiului, de 3-5 ori pe zi. Închideți ușor ochii pentru a permite o distribuție uniformă a lichidului pe suprafața oculară (3+4). Evitați orice contact al deschiderii flaconului cu ochiul sau mâinile. Dacă vreă picătură a rămas pe deschiderea flaconului, aceasta trebuie îndepărtată prin lovirea ușoară a fundului flaconului. Flaconul se închide prin apăsarea ușoară a capacului (5). Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic oftalmolog!

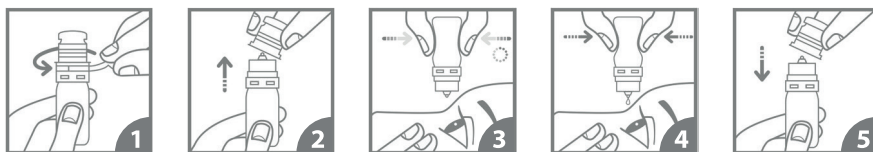

Sistemul steril special de filtrare al picurătorului necesită o perioadă de așteptare de câteva secunde după fiecare aplicare, fără a mai presa flaconul, pentru a permite ca aerul să intre din nou în flacon. Fără această perioadă de așteptare, o nouă aplicare este dificilă. Datorită acestui amănunt tehnic, este nevoie de presare suplimentară pe măsură ce flaconul se golește.

**INGREDIENTE:** 1 ml conține: hialuronat de sodiu 0.15%, ectoină 2%, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, apă pentru preparate injectabile.

**PREZENTARE:** Flacon x 10 ml

### **PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:**

- Nu utilizați dispozitivul medical dacă inelul de siguranță este rupt sau deteriorat.
- Nu atingeți ochiul cu picurătorul.
- Nu utilizați în caz de alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
- În cazuri foarte rare, aplicarea picăturilor pentru ochi poate provoca iritații la ochii foarte sensibili.
- Dacă utilizați în același timp alte picături de ochi sau unguente pentru ochi, așteptați în jur de 15 minute înainte de aplicarea **VIZIK Allergy**. Acesta trebuie întotdeauna utilizat ultimul.
- Nu folosiți în cazul ochilor cu semne de infecție sau leziuni.
- Uneori, după aplicare, vederea poate fi temporar neclară. Evitați conducerea vehiculelor, folosirea utilajelor și așteptați până când se restabilește vederea normală.
- Nu utilizați după expirarea datei de valabilitate înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului.
- Datorită sistemului special de filtrare, steril și inovator al canalului, o cantitate mică de soluție rămâne întotdeauna în flacon.
- Utilizați picăturile de ochi cel mult 12 luni de la prima deschidere.
- A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

### **CONDIȚII DE PĂSTRARE:**

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi între 2° C și 25° C, departe de surse de lumină.

Nu se depozitează la frigider.

După utilizare, închideți flaconul cu capac.

**CE 0483**

### **SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE AMBALAJ**



numărul de lot și



termenul de valabilitate sunt specificate pe etichetă și pe ambalajul extern



steril



nu utilizați dacă inelul de siguranță al capacului este rupt sau dacă flaconul este deteriorat



vezi instrucțiunile de utilizare



25°C temperatura de păstrare



**Producător:**  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstrasse 3  
92551 Stulln, Germania

**Distribuitor:**  
ZDROVIT România S.R.L.  
Str. Sevastopol nr. 13-17  
București

**Data ultimei actualizări a instrucțiunilor de utilizare: 11/2018**

**Bitte beachten!**

Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich! Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, produktionsinterne Nummern etc.) nicht *Weber druck & mehr...*, eine finale technische Prüfung muss vom Kunden durchgeführt werden.

<b>Name:</b> Vizik	<b>Land:</b> Polen	<b>Korrekturverlauf:</b> 1. Abzug: 27.11.2020 Fr. Gebhardt 2. Abzug: 3. Abzug: 4. Abzug:
<b>Objekt:</b> Beileger	<b>Version:</b> 22.0650.01	
<b>Maße:</b> 135x210	<b>Laetus:</b> 130	
<b>PMR-Nr.:</b>	<b>Ptgröße:</b> -	
<b>Farben:</b> 4C		